

GRAPADORA DE PIEL DESECHABLE

ISO 13485.1

Descripción

La grapadora de piel desechable y los extractores pueden utilizarse para el cierre de la piel en una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, adecuados para la sutura de la piel superficial de heridas e incisiones quirúrgicas.

Características

- Diseño simple y razonable, fácil de operar.
- Herida de sutura pequeña, evita dañar nuevamente el tejido epidérmico y favorece la cicatrización.
- Herida suturada suave y con cicatriz pequeña después de la operación.
- Reduce el tiempo de la operación y disminuye el dolor para los pacientes.
- Producto estéril desechable, económico y evita la infección cruzada de muchas enfermedades contagiosas.



Material:
Plástico

OEM:
Sí

USO:
sutura de
herida dérmica
e incisión



¡Contáctanos!



VYTТА PRO



@vyttapro



ventas@vyttapro.com



+52 33 1600 1540



www.vyttapro.com

Instrucciones de Uso de la Grapadora:

1. Limpiar la piel de la herida e incisión para la operación. Sostener la grapadora cutánea en la mano, asegurándose de que esté vertical a la piel y que la incisión esté en el centro de la grapa, luego presionar hacia la piel.
2. Sostener firmemente el mango móvil hasta que las grapas completen la sutura de la piel. (El mango debe mantenerse presionado hasta que se termine la operación y no puede soltarse durante el proceso de sutura).
3. Sostener firmemente el mango móvil hasta que las grapas completen la sutura de la piel. (El mango debe mantenerse presionado hasta que se termine la operación y no puede soltarse durante el proceso de sutura).
4. Soltar el mango móvil y, tomando el sitio de la sutura como centro, levantar el extremo de la grapadora en sentido antihorario para retirar la grapadora.
5. Repetir la operación anterior para el resto de la sutura hasta completar la sutura de la piel de la herida o incisión.

Cabeza en ángulo
Contiene 35 grapas

Rectangle Staple
Formation



Manija de disparo

CÓDIGO	NÚMERO DEL CLAVO	ANCHO (MM)	ALTURA (MM)
VBL0029	35 _A	14.00	3.80
VBL0030	35 _w	14.00	3.80