

Ficha Técnica

APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS DE POLÍMERO (HEM-O-LOK)

Características Generales

*Sistema de cierre
suave y preciso, sin
atascos*

*Mango ergonómico
de fácil control.*

Material:

Acero inoxidable médico
con componentes
plásticos de grado
quirúrgico.

Versiónes:

- Eje disponible en 5 mm de diámetro.
- Eje disponible en 10 mm de diámetro.

Compatibilidad:

- Compatible con clips Hem-o-lok de diferentes tamaños.

Descripción

Instrumento laparoscópico diseñado para la colocación automática de clips de polímero tipo Hem-o-lok, utilizados para la ligadura de vasos y conductos en cirugía mínimamente invasiva. Proporciona aplicación precisa y segura mediante un sistema mecánico de cierre controlado.

Medidas del Producto

Modelo	Diámetro del eje (mm)	Longitud (mm)	Ángulo de apertura
Hem-o-lok aplicador	5 ±5%	330 ±10%	16° ±10%
Hem-o-lok aplicador	10 ±5%	330 ±10%	16° ±10%

Instrucciones de uso

1. Esterilizar el aplicador antes de usarlo.
2. Cargar el clip Hem-o-lok en la cabeza del instrumento.
3. Introducir el aplicador por el trocar correspondiente.
4. Posicionar el clip sobre el vaso o conducto deseado.
5. Presionar el mango hasta oír el clic de cierre.
6. Confirmar la correcta colocación y liberar el clip.
7. Retirar el instrumento y limpiar según protocolo.

Contraindicaciones



No usar si el instrumento está dañado o presenta dificultad de cierre.



No utilizar en tejidos que no permitan un cierre firme.



Uso exclusivo por profesionales en cirugía laparoscópica.

Características de empaque

- Empaque individual sellado y etiquetado con información del producto.
- Protección frente a humedad, polvo y contaminación.
- Incluye instrucciones resumidas de uso y esterilización.



Instrucciones de esterilización

Método:

Autoclave.

Condiciones:

- Temperatura: 134 °C
- Presión: 0.2 MPa
- Tiempo mínimo: 5 minutos.

- *No usar agentes corrosivos.*
- *Asegurar limpieza total previa a la esterilización.*

Instrucciones de almacenaje

- Guardar en área seca y bien ventilada, libre de humedad y químicos.
- Humedad relativa: menor del 80 %.
- Evitar exposición directa al sol y golpes mecánicos.
- Vida útil estimada: más de 1000 ciclos de uso.

