

Ficha Técnica



APLICADOR DE CLIPS DE TITANIO

Características Generales

*Diseño ergonómico
con mango de
apertura suave.*

*Movimiento fluido
y cierre firme sin
atasco.*

*Reutilizable
hasta 1000 ciclos
si se mantiene
correctamente.*

Material:

Acero inoxidable médico
y titanio de grado
quirúrgico

Versiones:

- acción simple
- doble acción
- tipo triángulo derecho.

Compatibilidad:

- Trocares de 5 mm
- Trocares de 10 mm

Descripción

Instrumento laparoscópico reutilizable diseñado para la colocación de clips de titanio durante procedimientos de cirugía mínimamente invasiva. Permite la ligadura segura de vasos sanguíneos o conductos, asegurando hemostasia efectiva y controlada.

Medidas del Producto

Modelo	Diámetro del eje (mm)	Longitud (mm)	Ángulo de apertura
Acción simple	5 ±5% / 10 ±5%	330 ±10%	5° o 11° ±10%
Tipo triángulo derecho	10 ±5%	330 ±10%	-

Instrucciones de uso

1. Esterilizar el instrumento antes de cada uso
2. Seleccionar el tamaño adecuado del clip de titanio.
3. Cargar el clip en la cabeza del aplicador.
4. Introducir el aplicador a través del trocar laparoscópico.
5. Posicionar el clip y cerrar el mango hasta aplicar el clip.
6. Retirar el instrumento y limpiar inmediatamente después del uso.

Contraindicaciones



No se han reportado contraindicaciones específicas.



No usar si el instrumento presenta daños, desgaste o falla en el cierre.



Uso exclusivo por personal quirúrgico capacitado.

Características de empaque

- Empaque individual protector contra humedad y contaminación
- Etiqueta con nombre del producto, lote, fecha de fabricación y fabricante.
- Diseñado para mantener la integridad del instrumento durante el transporte.



Instrucciones de esterilización

Método:

Vapor a presión
(autoclave)

Condiciones:

- Temperatura: 134 °C
- Presión: 0.2 MPa
- Tiempo mínimo: 5 minutos

Asegurar limpieza previa y secado posterior.

Instrucciones de almacenaje

- Almacenar en ambiente seco, ventilado y sin agentes corrosivos.
- Humedad relativa: < 80 %.
- Evitar golpes o caídas.
- Vida útil: más de 1000 usos.

