

Ficha Técnica

CLIPS TIPO WECK



Características Generales

Uso único, estéril y desechable

Diseño con sistema de cierre seguro y trabas antideslizantes.

Alta resistencia mecánica y estabilidad química.

Material:

Polímero biocompatible de grado médico.

Versiones:

- Tamaño M
- Tamaño L
- Tamaño S

Compatibilidad:

- Compatibles con aplicadores de 5 mm
- Compatibles con aplicadores de 10 mm.

Descripción

Clips de polímero biocompatible diseñados para ligadura y cierre de vasos o conductos durante cirugías laparoscópicas.

Son compatibles con aplicadores estándar tipo Weck o Hem-o-lok y se utilizan como alternativa a clips metálicos.

Medidas del Producto

Tamaño	Ancho del clip (mm)	Longitud (mm)	Aplicador compatible
Pequeño	5 mm	20 mm	Aplicador 5 mm
Mediano	10 mm	25 mm	Aplicador 10 mm
Grande	10 mm	30 mm	Aplicador 10 mm

Instrucciones de uso

1. Seleccionar el clip adecuado al diámetro del vaso.
2. Cargar el clip en el aplicador correspondiente.
3. Introducir por el trócar y posicionar sobre el tejido.
4. Aplicar presión hasta el cierre completo del clip.
5. Retirar el aplicador con cuidado.
6. Desechar el clip usado según normas de bioseguridad.

Contraindicaciones



No usar en tejidos con grosor superior al rango del clip.



No reutilizar ni esterilizar nuevamente.



No usar en presencia de infecciones locales activas.

Características de empaque

- Empaque individual estéril, sellado.
- Etiqueta con tamaño, lote y fabricante.
- Diseñado para mantener esterilidad hasta su uso



Instrucciones de esterilización

Método:

Producto preesterilizado de fábrica.

- *No requiere esterilización adicional.*

Si se daña el empaque, descartar el producto.

Instrucciones de almacenaje

- Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición solar directa.
- Temperatura recomendada: 15 °C – 30 °C.
- No exponer a humedad ni agentes químicos.
- Mantener en su empaque original hasta el uso.

