

Ficha Técnica

RECARGA PARA GRAPADORA CURVA CORTANTE



Características Generales

Grapas fabricadas en titanio no aleado

Cuchilla de acero inoxidable médico, afilada y calibrada.

Sistema de encaje rápido y seguro al cuerpo principal.

Material:

Material del cartucho: polímero ABS / PC grado médico.

Recarga precargada y estéril, de un solo uso.

Compatibilidad:

- Modelo PHX-A-45
- Modelo PHX-B-40.

Descripción

Cartucho estéril de uso único, diseñado para ser utilizado exclusivamente con la Grapadora Curva Cortante PHX-A-45 / PHX-B-40.

Contiene grapas de titanio preformadas y una cuchilla de corte integrada que permite una nueva aplicación de grapado y sección tisular durante el mismo procedimiento quirúrgico.

Cada recarga proporciona un solo disparo funcional, asegurando uniformidad de la línea de grapas y corte preciso.



Medidas del Producto

Modelo	Longitud de grapado (mm)	Longitud de corte (mm)	Altura de grapa (mm)	Color del cartucho
PHX-A-45	45 ±2	40 ±2	4.8 ±0.2	Azul
PHX-B-40	40 ±2	35 ±2	4.5 ±0.2	Verde

Instrucciones de uso

1. Retirar la recarga de su empaque bajo técnica estéril.
2. Alinear el cartucho con el cuerpo de la grapadora y presionar hasta escuchar el clic de acople.
3. Confirmar visualmente que la recarga esté correctamente instalada.
4. Proceder al grapado y corte según las instrucciones del instrumento.
5. Tras su uso, desechar el cartucho de acuerdo con las normas de residuos biológicos.

Contraindicaciones



No usar con grapadoras de otros fabricantes o modelos no compatibles.



No reutilizar ni intentar reesterilizar.



No utilizar en tejidos necróticos, frágiles o de grosor excesivo.

Características de empaque

- Empaque individual sellado en blíster con papel médico.
- Producto estéril y libre de látex.
- Etiqueta con modelo compatible, lote, fecha de fabricación y fabricante.
- Caja de transporte con protección antimicrobiana y antihumedad.

STERILE

EO

Instrucciones de esterilización

Método:

Producto preesterilizado con óxido de etileno (EO).

Condiciones:

- No volver a esterilizar.

Garantía de esterilidad válida por 3 años a partir de la fecha de esterilización.

Instrucciones de almacenaje

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Almacenar en lugar seco, ventilado y sin exposición solar directa.
- Temperatura recomendada: 15 °C – 30 °C.
- Humedad relativa: ≤ 80 %.
- No apilar ni someter a presión.

